


X Serisi Kolaklar


ERLAU®
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

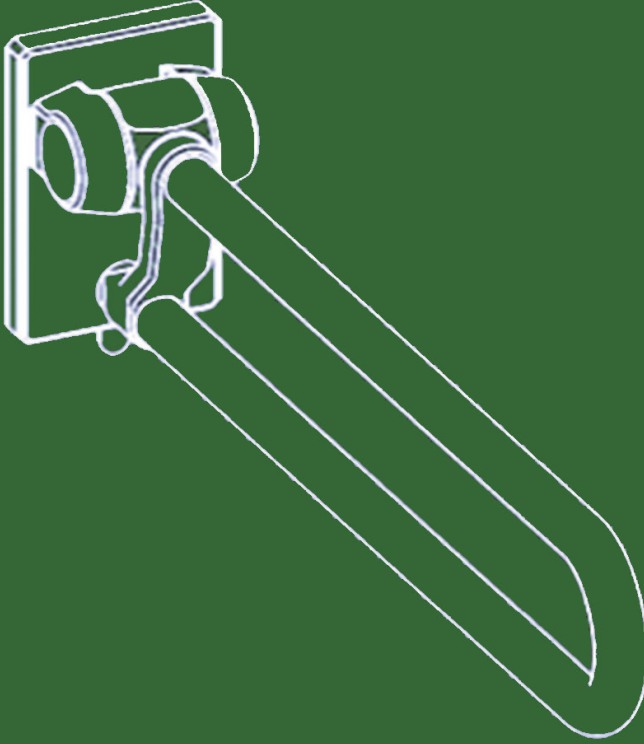


alıřtırma ve
Montaj Talimatları

CE
93/42/EWG


İçindekiler

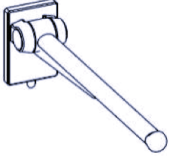

XSE	3
53805.. / 53806.. / 53807..	
Duvar Montajı	6
Katlama Freni	8

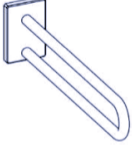

XSS	4
54004.. / 54005.. / 54006.. / 54007..	
Duvar Montajı	6

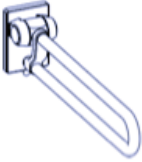




XSK	5
53926.. / 53927.. / 53928..	
Duvar Montajı	6
Sağ/Sol Ayarı	7
Sağ/Sol Ayarını Kilitleme	8
Katlama Freni	8
Kaldırma Kontrolü	9
Uygulama Örnekleri	9



Bakım Talimatları	10
-------------------	----




Uyarılar	11
----------	----

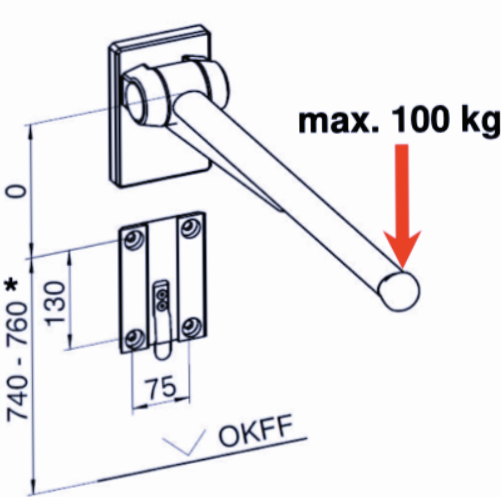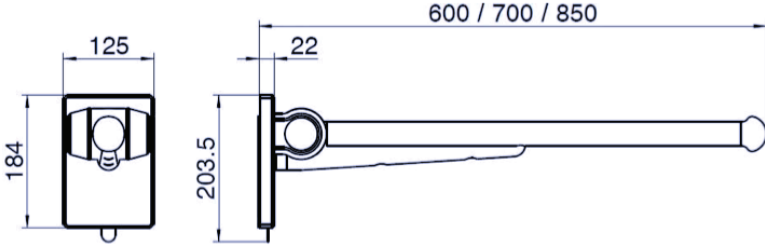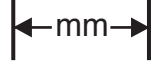



*



DIN 18040
ÖNORM B 1600
SIA 500

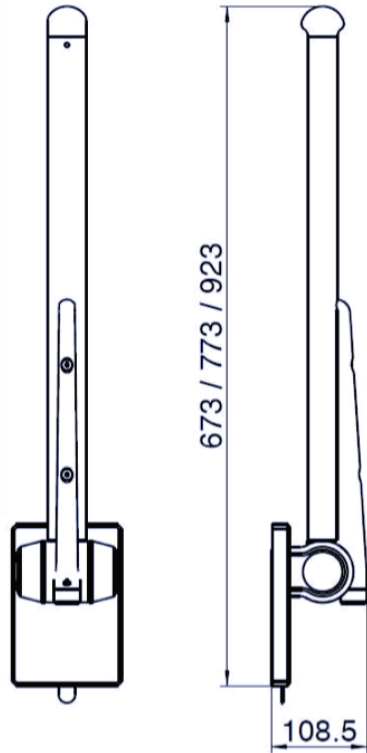


CE, 93/42 / EWG'ye uygundur ve DIN EN 12182'ye ve ISO 17966'ya göre 100 kg çalışma yükü ve 22.000 yük değişikliği ve 3 yıllık hizmet ömrü için test edilmiştir.

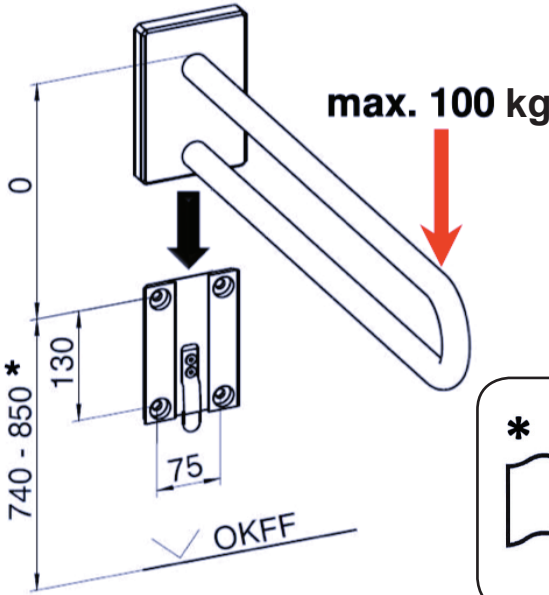
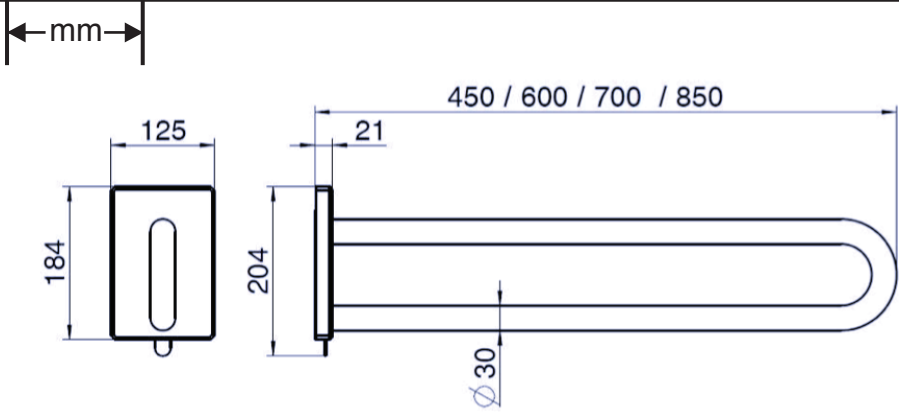








*
DIN 18040
ÖNORM B 1600
SIA 500

CE, 93/42 / EWG'ye uygundur ve DIN EN 12182'ye ve ISO 17966'ya göre 100 kg çalışma yükü ve 22.000 yük değişikliği veya 3 yıllık hizmet ömrü için test edilmiştir.


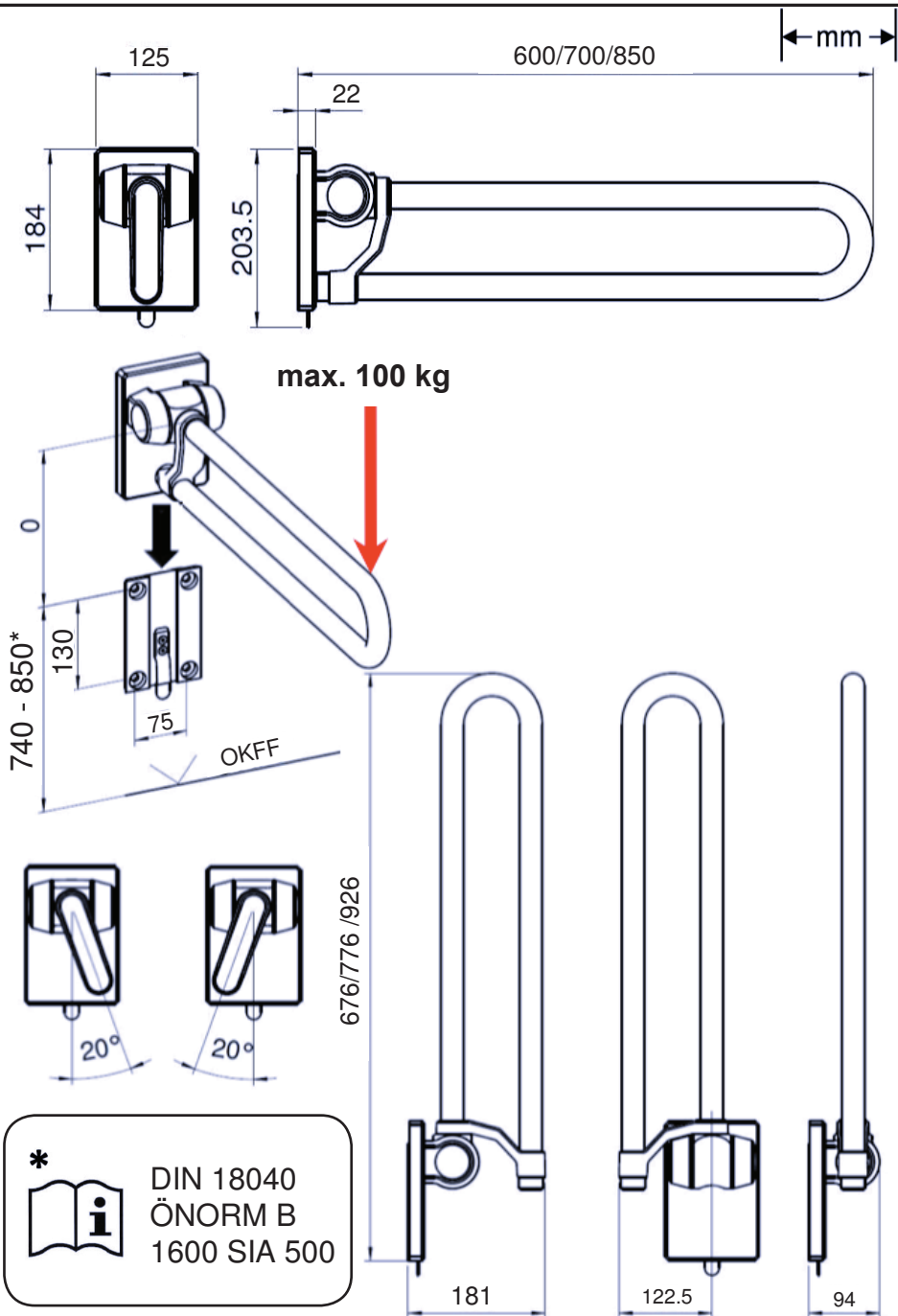


Duvar Montajı

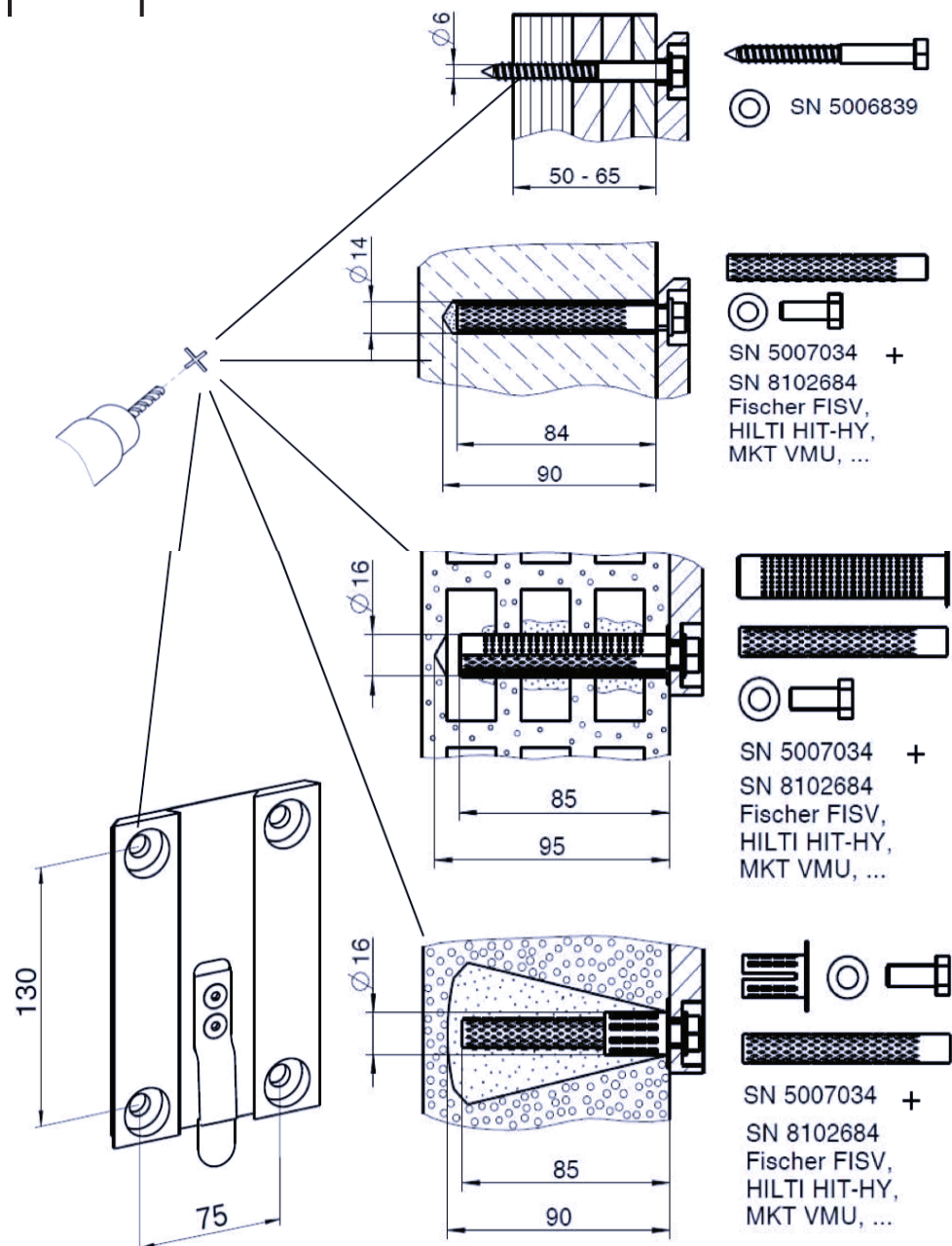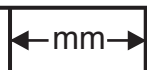


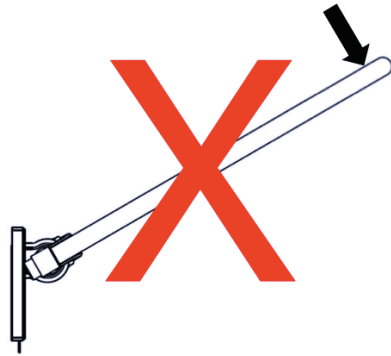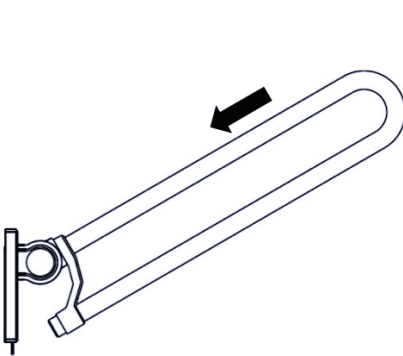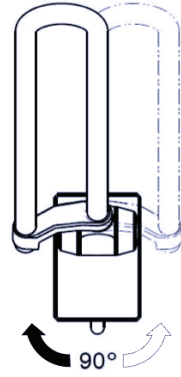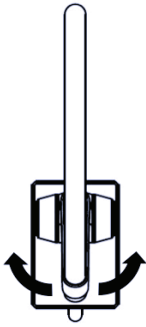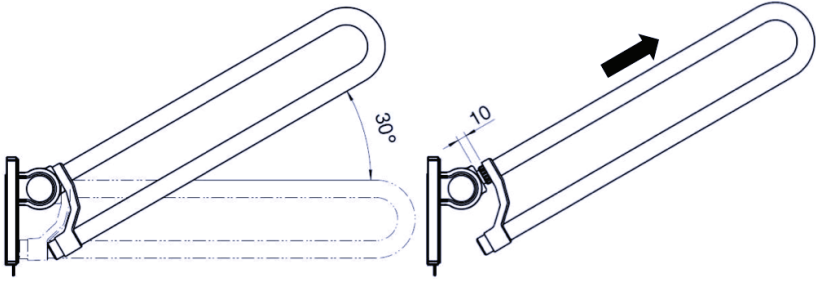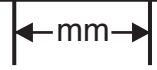


Sağ/Sol Ayarını Kilitleme

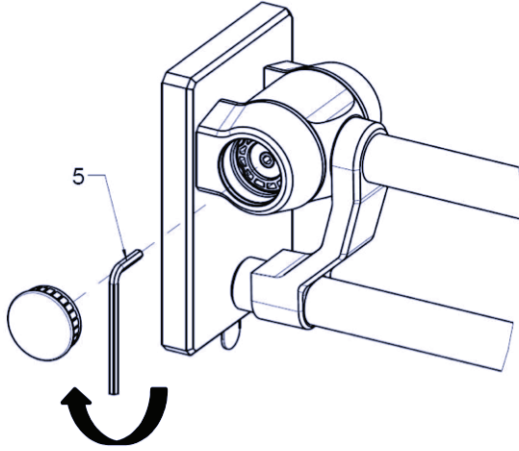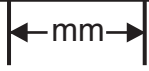

Katlama Freni


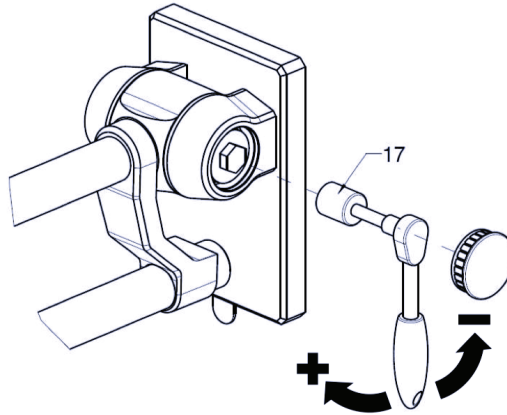


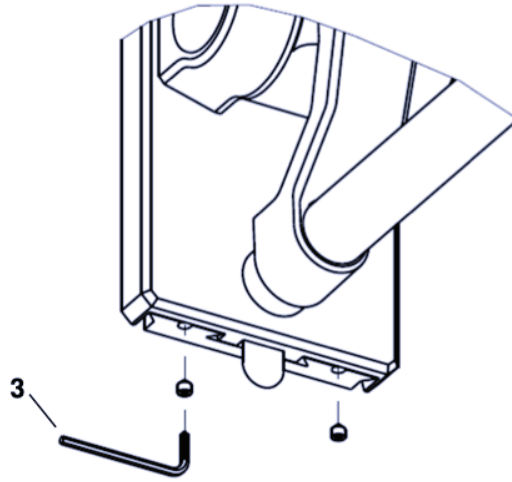

Uygulama Örnekleri

Stützklappgriff XSK
Schrägstellung 20°
Rückenstütze RSX

Stützklappgriff XSK
Rückenstütze RSX

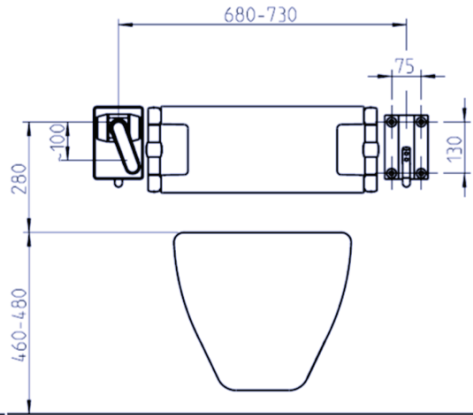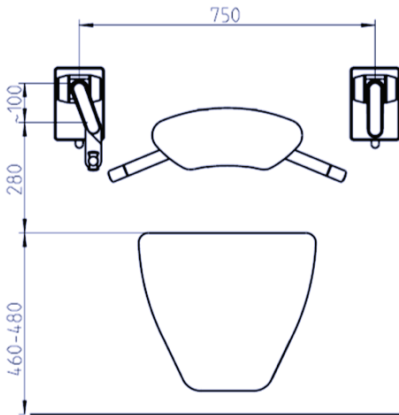

Erlau Ürünleri aşağıdaki Yüzey malzemeleri kullanmaktadır:

- * Toz Boya
- * Krom-Nikel
- * Eloksal kaplı Alüminyum
- * Plastikler

Yüzey temizliği için vizkoz veya karma malzemeden dokunmuş temiz ve nemli bir bez kullanın. Kimyasal temizlik malzemesi kullanılmak istendiğinde, PH derecesi sadece 6-8 arası olan temizlik kimyasalları kullanılmalıdır. Uygun temizlik malzemeleri etken madde olarak fosfat, sabun ve tensid kullanmaktadır. Alkol bazlı temizlik malzemeleri de kullanılabilir. Şüpheli durumlarda temizlik malzemesini ürünün görünmeyen yüzeylerinde test edebilirsiniz. Tuz ruhu, sirke ve formik asit gibi asit içerikli temizlik malzemeleri kullanılmamalıdır. Zemin temizleyici, endüstriyel temizlik malzemeleri gibi kül içerikli temizlik malzemeleri ve natriumhidroksid içerikli kimyasallar kullanmayınız. Aseton, seyreltilmiş azot veya benzin kullanmayınız. Yüzeyi tahrip edici aşındırıcı süngerler vb. malzemeler kullanmayınız. Eski temizlik bezleri üzerlerinde yapışmış ya da katılaşmış olabilecek kir ya da temizlik maddeleri nedeniyle ürünün yüzeyini çizebileceği için nadiren kullanılabilir. Bezlerin üzerinde kalan maddeleri gecikmeden temizleyiniz. Temizlik maddesi üreticilerinin kullanım talimatlarına uyunuz. Uygun temizlik maddeleri ve kullanım bilgilerine temizlik maddeleri üreticileri üzerinden ulaşabilirsiniz. Örn: www.buzil.com Bozulmuş yüzeylerde yapılacak temizlik maddesi uygulamaları yüzey kusurlarının ilerlemesine neden olacaktır.

Uygun olmayan temizlik yöntemleri nedeniyle oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Kullanım:

Tüm X-Serisi Kolçaklar en fazla 100 kg.'lık bir kullanım ağırlığı için tasarlanmıştır. Ürünlerin bu değerin üzerinde bir ağırlıkla kullanılmaması önerilir. Sınır değerin aşılması durumunda kolçakta kalıcı hasar meydana gelebilir. Bu durumda ağır yaralanmalı sonuçları olabilecek kazalar meydana gelebilir. Ağırlık sınır değerinin aşılarak kullanılması sonrasında tekrar kullanılmadan önce ürünler mutlaka uzman bir firma tarafından kontrol edilmelidir. Şüpheli durumlarda RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG Tel. + 49 7361 504-0 ile iletişime geçebilirsiniz.

ERLAU kolçaklarını sadece ön görülen fonksiyon olan tuvalete oturma, kalma veya tuvalete ulaşma gibi tutunma desteği amacıyla kullanınız. Amacı dışında kullanımlar; örn: üzerine çıkılması ya da tırmanma aleti gibi kullanım; ağır yaralanmalı kazalarla sonuçlanabilir. Aşırı yük uygulanması veya amacı dışında kullanılması durumunda oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

Montaj:

Erlau Kolçakları'nın güvenilir ve eksiksiz şekilde çalışması uzmanca yapılmış bir montaja bağlıdır. Bu nedenle kolçaklar eğitimli uzman personel(sihhi tesisat uzmanı) tarafından montaj edilmelidir. Usulüne uygun yapılmayan montajlar fonksiyon kaybına neden olabilir. Bu durumda ağır yaralanmalarla sonuçlanan kazalar meydana gelebilir. Kendi başınıza montaj yapmanız önerilmemektedir.

“Uzman personelin yapacağı montaj için ürüne uygun bir duvar özelliğinin sağlanması çok önemlidir. Bağlantı yapılacak kısmın düz(fayansların aynı düzlemde olması ve derzlerden harç çıkıntıları olmaması sağlanmalıdır) ve ürünü taşıyacak kadar kaliteli ve sağlam olması gerekmektedir. Amacına uygun dübel kullanılması şarttır. Şüpheli durumlarda RUD Ketten Rieger & Dietz GMBH u. Co. KG Tel. + 49 7361 504-0 ile iletişime geçebilirsiniz.”

Ehil olmayan montajlar sonrası oluşacak hasarlar garanti kapsamı dışındadır.

ERLAU METAL SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Şeyhli Mahallesi, Esra Sokak, No:8/2
34906, Pendik / İSTANBUL
Tel: +90 216 482 35 55
Fax: +90 216 482 35 56